

Q-Optics



TTL LOUPES - ISTRUZIONI

Q-Optics

Grazie per aver scelto i nostri
occhiali ingrandenti!



349 1028493 - Area commerciale
346 1403278 - Assistenza tecnica
0522 791927 - Amministrazione (Interno. 3)



qoptics@occhialiingrandenti.it



[qoptics_italia](https://www.instagram.com/qoptics_italia)

INCLUSO NEL TUO KIT



COSA TROVERAI:

- I tuoi ingrandenti TTL personalizzati
- Laccetto ferma-occhiali
- Naselli di ricambio
- Spray per la pulizia
- Pannetto in microfibra
- Prontezioni laterali (montature Classic e Panto)
- Inserto RX graduato(montatura Eclipse - se acquistato)

Accessori e ricambi disponibili su:
occhialiingrandenti.it/accessori/

Se hai acquistato anche una luce led, troverai ulteriori accessori nella custodia. Per ulteriori informazioni visita la pagina: occhialiingrandenti.it/sistemi-di-illuminazione-a-led/

ACCESSORI RIMOVIBILI

LUCI A LED



Allinea il canale di montaggio della luce al logo Q-Optics sulla montatura.



Fai scorrere la luce sul logo Q-Optics fino a quando non sarà saldamente fissato.

Rimuovi la luce prima di lavare i tuoi ingrandenti!

INSERTO GRADUATO (OPZIONALE)



L'attacco per l'inserto RX graduato si trova nelle montature Eclipse sopra i naselli e va allineato con il canale di fissaggio sul retro dell'inserto stesso.



Allinea all'attacco della montatura il canale di fissaggio sull'inserto RX e fallo scorrere verso il basso sulle viti. L'inserto dovrebbe risultare dietro ai naselli.


Fai scorrere verso l'alto per rimuovere l'inserto

Il tuo inserto RX può essere estratto per una facile pulizia!

PERSONALIZZA LA VESTIBILITÀ




CORRETTO

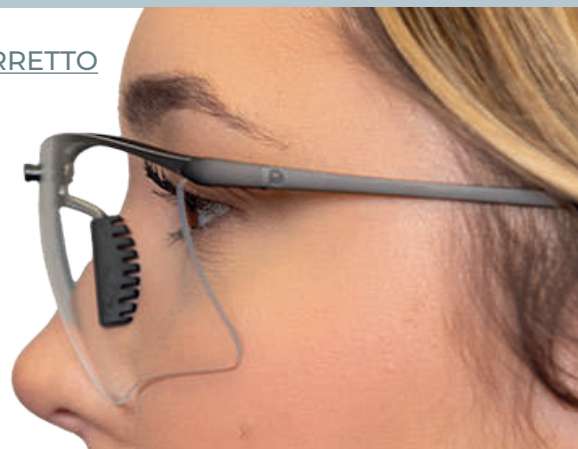

INCORRETTO

Gli ingrandenti dovrebbero rimanere nella parte alta del naso

Personalizzazione dei naselli

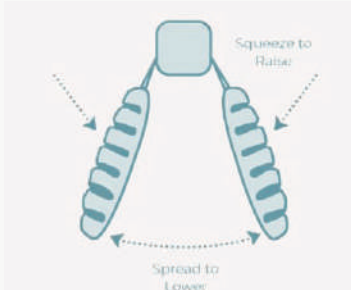

Per sollevare gli ingrandenti, avvicina i naselli tra loro;
per abbassare gli ingrandenti, allarga i naselli.

Personalizzare le astine



Piega il terminale delle astine per rendere la vestibilità più sicura e confortevole.

USARE GLI ACCESSORI

Naselli

Nella confezione sono inclusi dei naselli di ricambio per sostituirli in caso di usura.

I naselli a ponte e quelli singoli si montano e rimuovono alla stessa maniera. Rimuovi i naselli facendoli scorrere verso il basso sulle punte di metallo della montatura. Monta i nuovi naselli facendoli scorrere verso l'alto con il lato smerlato rivolto verso il viso.



CONSIGLIO: Qualche goccia di spray per la pulizia delle lenti favorisce l'inserimento delle estremità in silicone nelle astine.


Laccetti ferma-occhiali

Un laccetto è incluso per aiutarti a tenere gli ingrandenti a posto mentre li si indossa. Per attaccare il laccetto agli ingrandenti inserisci le estremità in silicone alle astine. Per garantire l'efficacia del laccetto ferma-occhiali è necessario inserire le estremità in silicone fino in fondo.




Sulle protezioni laterali è indicato su quale lato vanno inserite.

Protezioni laterali

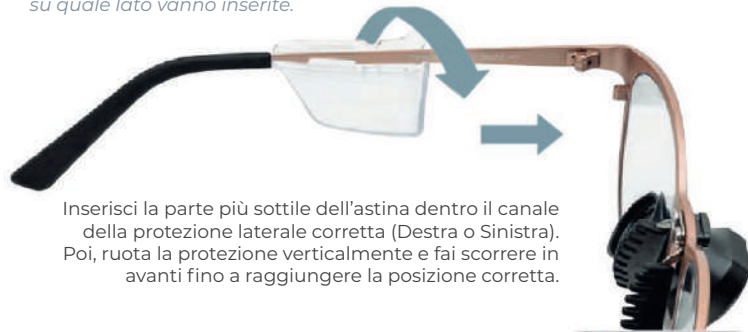

Inserisci la parte più sottile dell'astina dentro il canale della protezione laterale corretta (Destra o Sinistra). Poi, ruota la protezione verticalmente e fai scorrere in avanti fino a raggiungere la posizione corretta.

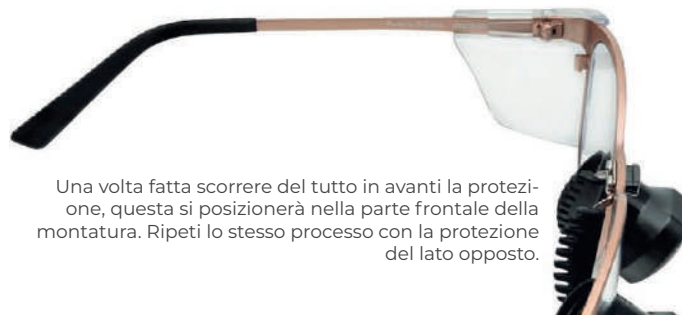

Una volta fatta scorrere del tutto in avanti la protezione, questa si posizionerà nella parte frontale della montatura. Ripeti lo stesso processo con la protezione del lato opposto.

PULIRE GLI INGRANDENTI



RISCIACQUA

Step 1



Rimuovi la luce dagli ingrandenti!

Risciacqua gli ingrandenti con sapone delicato e acqua tiepida.

DISINFETTA

Step 2



Opzionale:

Disinfetta gli ingrandenti con le salviette CaviWipes.

ASCIUGA

Step 3



Utilizza il pannello in microfibra incluso nel kit pulizia lenti Q-Optics e asciuga completamente gli ingrandenti.

- ! Non immergere mai gli ingrandenti o la luce, nemmeno dentro l'acqua
- ! Non inserire mai gli ingrandenti o la luce nei pulitori ad ultrasuoni
- ! Per pulire tilizza un panno in microfibra o in cotone (non prodotti di carta)

CURA E MANUTENZIONE

L'opportuna conservazione degli ingredienti aiuterà a mantenere nel tempo la performance e la vestibilità ottimale. Conservare gli ingredienti nell'apposita custodia e seguire le linee guida elencate in questo manuale preserverà la durata negli anni.

GARANZIA

Q-Optics si assicura che i materiali, realizzazione e design dei tuoi ingrandenti sono senza difetti e garantiti a VITA.

Le Luci, come anche i dispositivi elettronici, sono coperti da una diversa garanzia limitata (2 anni).



Q-Optics Italia

Via J. F.Kennedy, 15Q
42124 Reggio nell'Emilia, RE
www.q-opticsitalia.it