

# ***Q-Optics***



TTL OCCHIALI INGRANDENTI - ISTRUZIONI

# *Q-Optics*

Grazie per aver scelto i nostri  
occhiali ingrandenti!



349 1028493 - Area commerciale  
346 1403278 - Assistenza tecnica  
0522 791927 - Amministrazione (Interno. 3)



[qoptics@occhialiingrandenti.it](mailto:qoptics@occhialiingrandenti.it)



[qoptics\\_italia](https://www.instagram.com/qoptics_italia)

# INCLUSO NEL TUO KIT



## COSA TROVERAI:

- I tuoi ingredienti TTL personalizzati
- Laccetto ferma-occhiali
- Naselli di ricambio
- Spray per la pulizia
- Pannetto in microfibra
- Protezioni laterali (montature Classic e Panto)

Accessori e ricambi disponibili su: [occhialiingredienti.it/accessori/](http://occhialiingredienti.it/accessori/)

## ACCESORI

Se hai acquistato anche una luce led, troverai ulteriori accessori nella custodia. Per ulteriori informazioni visita la pagina: [occhialiingredienti.it/sistemi-di-illuminazione-a-led/](http://occhialiingredienti.it/sistemi-di-illuminazione-a-led/)

# ACCESSORI REMOVIBILI

## LUCI A LED



Allinea il canale di montaggio della luce al logo Q-Optics sulla montatura.



Fai scorrere la luce sul logo Q-Optics fino a quando non sarà saldamente fissato.

Rimuovi la luce prima di lavare i tuoi ingrandenti!

## INSERTO GRADUATO (OPZIONALE)



L'attacco per l'inserto RX graduato si trova nelle montature Eclipse sopra i naselli e va allineato con il canale di fissaggio sul retro dell'inserto stesso.



Allinea all'attacco della montatura il canale di fissaggio sull'inserto RX e fallo scorrere verso il basso sulle viti. L'inserto dovrebbe risultare dietro ai naselli.


Fai scorrere verso l'alto per rimuovere l'inserto

Il tuo inserto RX può essere estratto per una facile pulizia!

# PERSONALIZZA LA VESTIBILITÀ




CORRETTO

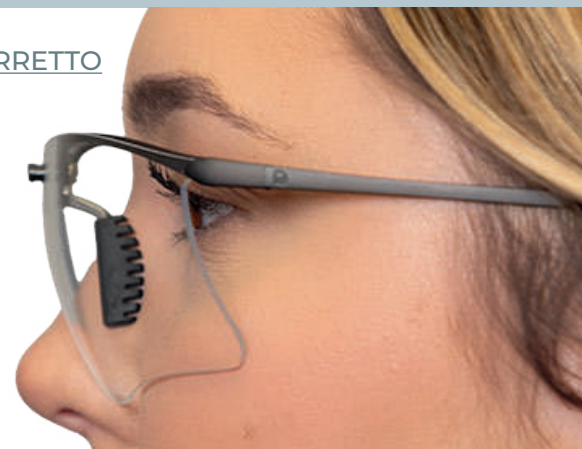


INCORRETTO

Gli ingredienti dovrebbero rimanere nella parte alta del naso

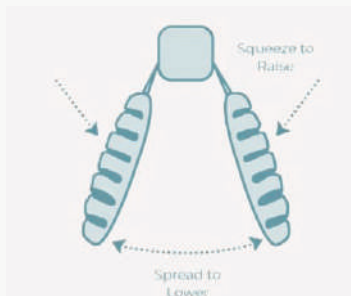

QÈRŠŃÁLĪZZÁŽIŃĚÁĎĚĪÁNÁŠĚLĪ

Per sollevare gli ingredienti, avvicina i naselli tra loro; Ā per abbassare gli ingredienti, allarga i naselli.

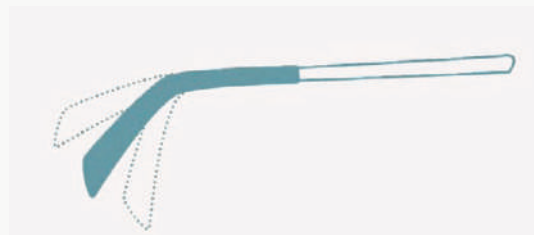

QÈRŠŃÁLĪZZÁŽIŃĚÁĎĚLĚÁŠŤĪNĚ

Piega il terminale delle astine per rendere la vestibilità più sicura e confortevole.

# USARE GLI ACCESSORI

## Naselli

*Nella confezione sono inclusi dei naselli di ricambio per sostituirli in caso di usura.*

I naselli a ponte e quelli singoli si montano e rimuovono alla stessa maniera. Rimuovi i naselli facendoli scorrere verso il basso sulle punte di metallo della montatura. Monta i nuovi naselli facendoli scorrere verso l'alto con il lato smerlato rivolto verso il viso.



*CONSIGLIO: Qualche goccia di spray per la pulizia delle lenti favorisce l'inserimento delle estremità in silicone nelle astine.*


## Laccetti ferma-occhiali

Un laccetto è incluso per aiutarti a tenere gli ingrandenti a posto mentre li si indossa. Per attaccare il laccetto agli ingrandenti inserisci le estremità in silicone alle astine.




*Sulle protezioni laterali è indicato su quale lato vanno inserite.*

## Protezioni laterali

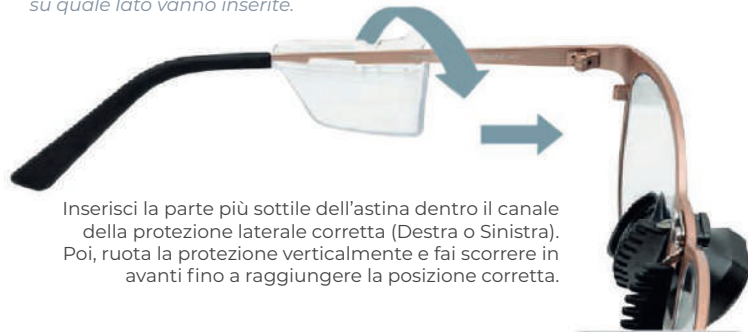

Inserisci la parte più sottile dell'astina dentro il canale della protezione laterale corretta (Destra o Sinistra). Poi, ruota la protezione verticalmente e fai scorrere in avanti fino a raggiungere la posizione corretta.

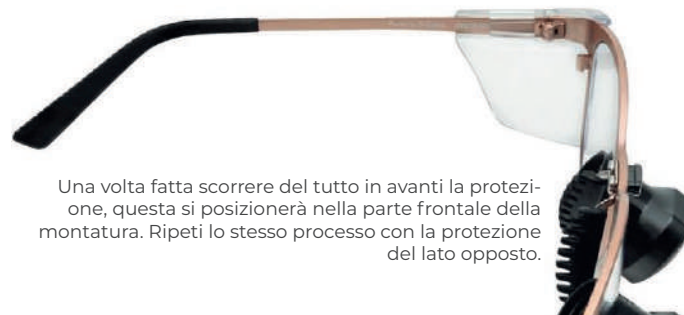

Una volta fatta scorrere del tutto in avanti la protezione, questa si posizionerà nella parte frontale della montatura. Ripeti lo stesso processo con la protezione del lato opposto.

# PULIRE GLI INGRANDENTI



## RISCIACQUA

### Step 1



**Rimuovi la luce dagli ingrandenti!**

Risciacqua gli ingrandenti con acqua tiepida.

## IGIENIZZA

### Step 2



Utilizza il pannello in microfibra e lo spray inclusi nel kit Q-Optics e asciuga completamente gli ingrandenti .

## DISINFETTA

### Step 3



Disinfetta gli ingrandenti con le salviette CaviWipes.

- ! Non immergere mai gli ingrandenti o la luce dentro l'acqua
- ! Non inserire mai gli ingrandenti o la luce nelle vasche ad ultrasuoni o in autoclave
- ! Per pulire utilizza un panno in microfibra pulito (no carta o scottex)
- ! Evitare il contatto diretto del rilevatore di placca con le lenti
- ! Se è presente polvere, sabbia o altri residui è consigliato usare la siringa dell'aria per rimuoverli prima di utilizzare il pannello in microfibra

## CURA E MANUTENZIONE

L'opportuna conservazione degli ingrandenti aiuterà a mantenere nel tempo la performance e la vestibilità ottimale.

Conservare gli ingrandenti nell'apposita custodia e seguire le linee guida elencate in questo manuale preserverà la durata negli anni.

Non sottoporre gli occhiali ingrandenti ad alte temperature.

## GARANZIA

Le montature, la collimazione dei monocli e l'adesione alle lenti portanti di ogni occhiale ingrandente Q-Optics sono garantite a vita. Le luci, come anche i dispositivi elettronici, sono coperti da una diversa garanzia limitata

(scopri di più su:

<https://www.occhialiingrandenti.it/supporto/>).



### **Q-Optics Italia**

Via J. F.Kennedy, 15Q

42124 Reggio nell'Emilia, RE

[www.q-opticsitalia.it](http://www.q-opticsitalia.it)